


# Herramienta de selección de tallas para embudos de Medela

Utiliza esta herramienta como punto de partida para ayudarte a seleccionar la talla adecuada de embudo en función del diámetro de tu pezón. Medela ofrece diferentes opciones y tallas de embudos. Un ajuste correcto es fundamental para obtener una extracción cómoda y eficaz, además de ayudar a optimizar el flujo de leche.

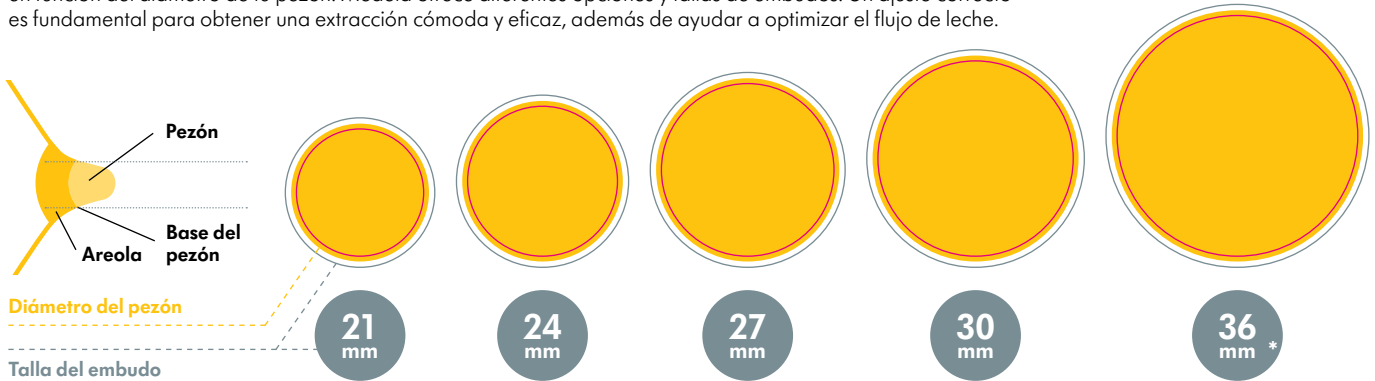


\* PersonalFit Flex™ no está disponible en la talla de 36 mm

## Cómo encontrar tu ajuste óptimo

Antes de iniciar una sesión de extracción, encuentra el círculo que más se aproxime al tamaño de tu pezón (sin incluir la areola). La talla correcta debe ofrecer un ajuste ceñido, aunque también cómodo, alrededor del pezón. No debería ser necesario forzar la entrada del pezón en el círculo.


### Comprueba el tamaño de tu embudo

- Comienza con la talla de embudo que acabas de medir o con la que viene con tu extractor.
- Centra el pezón y sujeta el embudo contra el pecho con suavidad.
- Ajusta el vacío máximo tolerable para alcanzar un nivel óptimo de succión.
- Toma las siguientes imágenes como referencia durante la fase de extracción (tras la fase de estimulación).

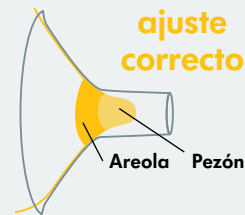

- El pezón está centrado y se mueve libremente.

### demasiado pequeño

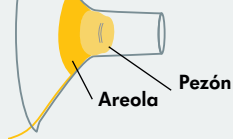

- Tu pezón roza contra el lateral del túnel.
- Prueba con una talla más grande.

### demasiado grande



- El pezón y un trozo de la areola entran en el túnel.
- Prueba un tamaño más pequeño.

### ¿Sabías que...?

- Es posible que necesites un embudo de diferente tamaño para cada mama.
- El tamaño de tu embudo dependerá del tejido de la mama y de la elasticidad de la piel.
- El tamaño de tu embudo podría variar en el tiempo en el que extraigas leche.
- Un exceso de presión en el embudo podría bloquear los conductos galactóforos.

### Razones para probar otro tamaño

- ¿Tu pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias?
- ¿Has apreciado que un trozo de la areola entra en el túnel?
- ¿Aprecias alguna rojez o marca blanca?
- ¿Notas que queda leche por extraer tras la extracción?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «**SÍ**», es recomendable que pruebes un nuevo tamaño. Si sigues sin estar segura de haber seleccionado el tamaño correcto, diríjete a una consultora de lactancia o a un especialista en lactancia.

Puedes ver nuestro vídeo sobre ajuste en [medela.es/guiadetallas](http://medela.es/guiadetallas)