

Programas de extracción Symphony

Instrucciones de inicio rápido

El extractor de leche Symphony con sus programas de extracción basados en investigaciones se ha desarrollado específicamente como apoyo para las madres durante el período de lactancia: ayuda a iniciar, generar y mantener una producción de leche adecuada.



Symphony contiene dos programas de extracción:

1 El programa INITIATE ayuda a las madres que requieren un extractor a iniciar con éxito la producción de leche. El programa simula la forma de succionar y hacer pausas irregular y más rápida de un recién nacido a término durante los primeros días de lactancia.

2 El programa MAINTAIN ha sido diseñado para optimizar la producción de leche tras la activación secretora («subida de la leche») con el fin de ayudar a las madres a generar y mantener una producción de leche adecuada. El programa con la tecnología 2-Phase Expression simula la forma de succionar del recién nacido a término durante la lactancia establecida.

Se recomienda la extracción doble, puesto que puede fomentar el aumento y mantenimiento de la producción de leche.



1 Programa INITIATE

Utilice el programa INITIATE justo después de dar a luz:

I Hasta que haya extraído como mínimo un total de 20 ml en cada una de las tres últimas sesiones de extracción, **O**

I Durante los primeros cinco días. Si la activación secretora no ha comenzado transcurridos cinco días, cambie al programa MAINTAIN.

El programa INITIATE funciona automáticamente durante 15 minutos, con varias pausas. Es importante dejar que el programa finalice por completo. Al final del programa la pantalla muestra «Programa acabado». El extractor se apaga automáticamente.

2 Programa MAINTAIN

Utilice el programa MAINTAIN tras la activación secretora:

I Cuando haya extraído como mínimo un total de 20 ml en cada una de las tres últimas sesiones de extracción, **O**

I A partir del sexto día, lo que ocurra primero.


Continúe la extracción hasta que los pechos parezcan vacíos y blandos por toda su superficie (Medela recomienda un tiempo de extracción de 15 minutos como mínimo). El programa de extracción debe apagarse manualmente. Para obtener más información, póngase en contacto con su consultora de lactancia o su matrona.




Nota: estas instrucciones rápidas no sustituyen las instrucciones de uso habituales. Si desea obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones de Symphony.

1 INITIATE


2 MAINTAIN

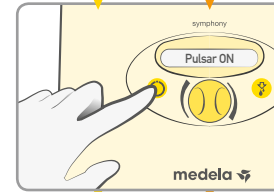


Encienda el extractor de leche (botón de encendido/apagado).

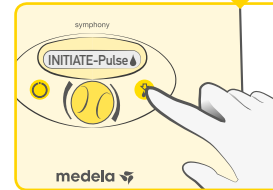


Mantenga pulsado el botón de bajada de la leche **durante 10 segundos**.

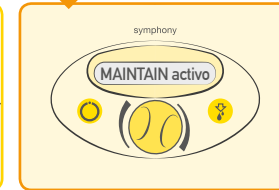

Empieza la fase de estimulación. Transcurridos dos minutos, el extractor de leche cambiará automáticamente a la fase de extracción.

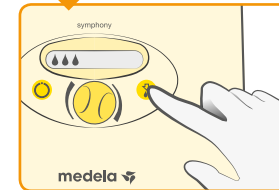

Si la leche empieza a fluir antes de los dos minutos, pulse el botón de bajada de la leche para cambiar a la fase de extracción.

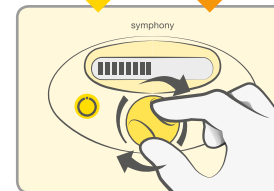

Ajuste el vacío a un nivel cómodo: Gire la rueda hacia la derecha para aumentar el vacío hasta que sienta una leve molestia. A continuación, gírela hacia la izquierda para reducir el vacío hasta un nivel que le resulte cómodo.



Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
Esta publicación no ha sido concebida para su distribución en Estados Unidos.

Spain & Portugal

Productos Medicinales Medela, S.L., C/Manuel Fernández Márquez, 49, 08918 Badalona (Barcelona)

Spain Phone +34 93 320 59 69, Fax +34 93 320 55 31, info@medela.es, www.medela.es

Portugal Phone +351 808 203 238, Fax +351 808 203 239, info@medela.pt, www.medela.pt