

COVID-19 Symphony

Recomendaciones de limpieza y desinfección

El virus que causa COVID-19 y otros coronavirus humanos endémicos (HCoV) pueden persistir en superficies como metal, vidrio o plástico hasta 3 días, pero la transmisión del virus se puede prevenir con la limpieza y el uso de desinfectantes.

Seguridad / Garantía

Medela cumple con los más altos estándares de higiene y seguridad para proteger contra la propagación de agentes patógenos entre los usuarios.

Recomendaciones de limpieza y desinfección

Paso 1

Solo **personal autorizado** puede entrar en el área de servicio y limpieza.






Paso 2

Todo el personal debe cumplir con la estricta higiene de manos antes de entrar y salir del área designada, lavándose las manos regularmente durante un mínimo de 20 segundos utilizando desinfectante para manos en los puestos de trabajo.

Paso 3

Todo el personal asignado para limpiar, desinfectar y reparar los extractores de leche devueltos debe usar equipo de protección personal (EPP).

¿Qué equipo de protección personal se debe usar?

Acción		Fundamento
Cambie su ropa y zapatos por ropa y zapatos designados para el puesto de trabajo		La carga microbiana se puede transmitir a través de la ropa y los zapatos
Lávese las manos regularmente con agua caliente limpia y jabón durante un mínimo de 20 segundos. Seque con una toalla de papel limpia desechable. Use desinfectante para manos después de lavarse las manos		El desinfectante de manos solo debe usarse en manos limpias
Utilice un delantal protector sobre la ropa		Para minimizar las salpicaduras y proteger la ropa
Utilice gafas protectoras / visera facial		Para minimizar las salpicaduras de la limpieza y evitar que los agentes desinfectantes vuelvan a los ojos y las gafas.
Use guantes desechables, no estériles y sin látex.		Asegúrese de que todas las heridas abiertas estén cubiertas con vendas a prueba de agua o tiritas. Utilice un protector adicional contra el agente desinfectante y cualquier carga microbológica potencial


Limpeza y desinfección de extractores de leches devueltos para alquiler / reparación

Limpeza – limpie el extractor de leche con un paño limpio y húmedo (no mojado). Use agua potable y detergente neutro o un detergente no abrasivo. Dejar reposar durante 5 minutos y dejar secar al aire

Desinfección - limpie la carcasa del extractor con un paño limpio y húmedo (no mojado). Puede usar un agente desinfectante a base de alcohol (mínimo 70% de alcohol). Dejar reposar durante 5 minutos y dejar secar al aire.

En la página web de Medela COVID hay disponible una lista de desinfectantes aprobados para Symphony y de eficacia comprobada contra el SARS-CoV-2, según sus fabricantes.

Recomendaciones de limpeza y desinfección

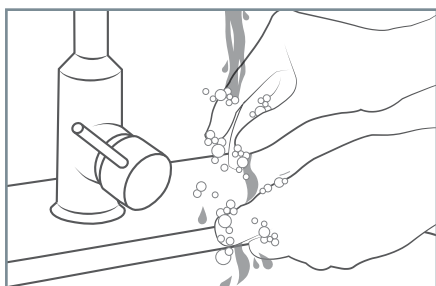


1. Lávese las manos un mínimo de 20 segundos con jabón y agua caliente. Secar, poner guantes y EPP.




2. Aplique detergente y limpie el exterior y el interior del maletín del extractor. Dejar reposar durante 5 minutos y dejar secar al aire.




3. Aplique detergente y limpie las superficies externas del extractor de leche. Dejar reposar durante 5 minutos y dejar secar al aire.

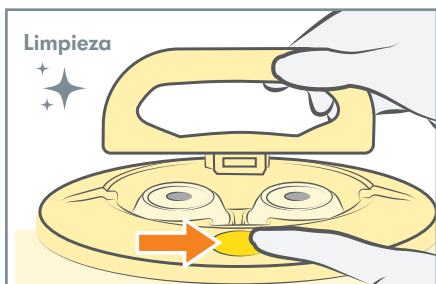

4. Con un paño húmedo, limpie bien el asa y la tapa. Limpie el botón a fondo, así como el área interna.

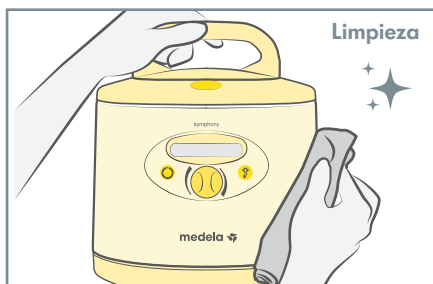


5. Limpie a fondo con un paño húmedo con cuidado de los botones de la pantalla y el botón de control.

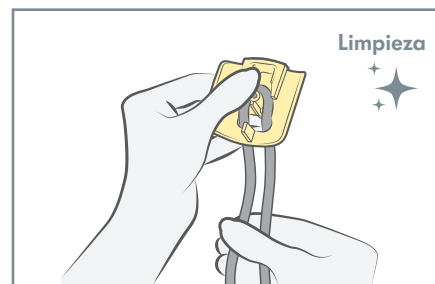

6. Limpie bien el cable eléctrico con un paño húmedo.



7. Retire el protector de la tarjeta y la tarjeta. Limpie ambos con un paño húmedo.

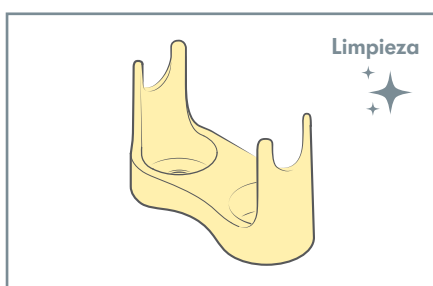

8. Retire y coloque el soporte de las botellas en agua caliente y detergente, lave, enjuague y seque.



9. Desinfecte con un paño o agente desinfectante aprobado. Dejar secar al aire. Siga los pasos del 2 al 8 para desinfectar la caja, el extractor de leche, el cable y el soporte del biberón.

Quítese los guantes según las indicaciones del EPP. Lávese las manos de inmediato. Deseche la ropa usada, toallitas, guantes en una bolsa de plástico y séllela o ciérrala. Estos contenidos deben ser puestos en dobles bolsas y desechados diariamente.